

RU

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧЕТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ

ПОКАЗАНИЯ

- Временная фиксация временных коронок и т.д.
- Непрямое закрытие пульпы, временное запечатывание после препарирования полости
- Временное пломбирование полостей молочных зубов

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не использовать продукт для пациентов с известной аллергией на этот продукт или другие поликарбоксилатные цементы.
2. Пользователи с известной аллергией на этот продукт или другие поликарбоксилатные цементы не должны использовать этот продукт.
3. В случае появления у пациента или пользователя раздражений или других аллергических реакций, немедленно прекратить применение и проконсультироваться у врача.
4. Жидкость и смесь этого продукта не должны вступать в контакт с мягкими тканями полости рта, кожей или глазами. При случайном контакте с мягкими тканями полости рта или кожей немедленно промокнуть ватным тампоном, смоченным спиртом и прополоскать большим количеством воды. При контакте с глазами немедленно прополоскать большим количеством воды и проконсультироваться у врача.
5. Этот продукт содержит свободную кремневую кислоту. Вдыхание свободной кремневой кислоты в течение длительного времени может быть вредно для легких. Для защиты от вредной для здоровья пыли, исходящей от этого продукта, используйте локальную отсасывающую систему, пылезащитную маску и т.д.
6. Этот продукт предназначен только для использования в стоматологии.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Стандартное соотношение порошок/жидкость: 2,2 g/1,0 g
Дозировать на блок для замешивания ложку порошка наравне с краями, используя прилагаемую мерную ложку, а также отдельно две капли жидкости.
2. Смешивание
Дозированный порошок разделить на две равные части; сначала добавить одну половину к дозированной жидкости и смешивать шпателем 15 - 20 сек. Затем постепенно добавить вторую половину и смешивать до получения однородной пасты. Замешивание не должно продолжаться более 45 сек.
3. Временное цементирование/пломбирование
Смесь сразу использовать для цементирования, пломбирования или запечатывания.
4. Затверждение и удаление излишков
После цементирования или пломбирования защищать обрабатываемый участок примерно в течение 8 мин. от загрязнения слюной. Затем удалить как обычно затвердевшие остатки.
5. Удаление
Удалить временную реставрацию и остатки этого материала. Поверхности зубов тщательно почистить перед установкой окончательной реставрации.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Всегда пользоваться прилагаемой мерной ложкой. С помощью интегрированного выравнивателя обеспечить точное дозирование порошка.
- Флакон с жидкостью перед использованием поставить дном вверх, чтобы дозировать капли без пузырьков воздуха.
- Для точного дозирования удалить возможное закупоривание горлышка флакона засохшей жидкостью, используя влажную марлю и т.д.
- Флаконы (порошок и жидкость) сразу плотно закрывать после каждого использования. Тщательно следить за тем, чтобы порошок был защищен от влаги.
- Поверхности зубов, подлежащие цементированию, или полости, подлежащие пломбированию, должны быть немного влажными. Не высушивать слишком сильно.
- В случае открытой пульпы или полостей, расположенных близко к пульпе, нанести защитный материал для пульпы (гидроокись кальция и т.д.).
- Не использовать продукт для цементирования постоянных реставраций.
- Использовать продукт исключительно для целей, указанных в разделе ПОКАЗАНИЯ этой инструкции.
- Используйте этот продукт до истечения срока годности, указанного на упаковке или контейнере. (Пример □ ГГГГ-ММ-ДД → год-месяц-дата окончания срока годности)

ХРАНЕНИЕ

Хранить при комнатной температуре (1-30 °C). Избегать воздействия высоких температур и высокой влажности воздуха. Защищать от прямых солнечных лучей.