

Праймер для сцепления с керамикой или композитом

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

SHOFU Porcelain Primer представляет собой праймер для обработки поверхности керамических или композитных реставраций в целях улучшения сцепления с композитным цементом. SHOFU Porcelain Primer может применяться как внутри, так и вне полости рта.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Сцепление керамических или композитных реставраций с композитным цементом

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не используйте данный продукт у пациентов с известной аллергией на этот материал и/или мономер метакрилата.
2. Врачам с известной аллергией на этот материал и/или мономер метакрилата не следует использовать данный продукт.
3. При возникновении любого воспаления или аллергических реакций у пациента или врача немедленно прекратите применение и обратитесь за медицинской помощью.
4. Используйте в хорошо проветриваемых помещениях во избежание вдыхания паров спирта (рекомендуется проводить несколько проветриваний в час). Если вдыхание вызывает тошноту или затруднения с дыханием, передохните и выйдите на свежий воздух.
5. Удалите все источники воспламенения, так как продукт огнеопасен.
6. Используйте защитные перчатки и очки во избежание сенсибилизации к данному продукту. При случайном контакте с мягкими тканями полости рта или кожей немедленно протрите ватным шариком, смоченным в спирте, и промойте большим количеством воды. При попадании в глаза немедленно промойте глаза большим количеством воды и обратитесь за медицинской помощью.
7. Соблюдайте инструкции по применению к каждому стоматологическому материалу, инструменту или прибору, используемому с этим продуктом.
8. Не используйте данный продукт для каких-либо иных целей, не указанных в данной инструкции.
9. Используйте этот продукт до истечения срока годности, указанного на упаковке или контейнере.
(Пример: 2 ГГГГ-ММ-ДД → год-месяц-дата окончания срока годности)
10. Данный продукт предназначен только для профессионального стоматологического применения.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Предварительная обработка поверхности реставрации
 - 1-1. Применение в полости рта
Придайте шероховатость фиксируемой поверхности реставрации денальным абразивом (напр., алмазным бором и др.), промойте водой и просушите чистым воздухом. Дополнительное протравливание фосфорной кислотой (концентрация 30-40%) улучшает адгезию.
 - 1-2. Применение вне полости рта
Выполните пескоструйную обработку фиксируемой поверхности реставрации частицами оксида алюминия размером 50-100 мкм под давлением около 0,1-0,2 МПа/1-2 бара. Затем промойте водой и просушите чистым воздухом.
2. Нанесение SHOFU Porcelain Primer
Отмерьте достаточное количество SHOFU Porcelain Primer в чашку. Одноразовой кисточкой нанесите в один слой на всю фиксируемую поверхность. Оставьте в покое на 10 с и высушите естественным образом.
3. Посадка/ремонт реставраций
Соблюдайте инструкцию производителя композитного цемента.

(Примечания)

- НЕ смешивайте с другими праймерами и бондинговыми системами.
- Плотнo закрывайте крышкой после каждого применения, так как продукт содержит летучие вещества. Быстро используйте весь отмеренный материал.
- Используйте отсос или слюноотсос во время работы.
- Не допускайте загрязнения поверхности сцепления реставрации. При загрязнении поверхности слюной или кровью тщательно очистите поверхность ватным шариком, смоченным в спирте. Затем просушите поверхность и заново нанесите материал.
- Быстро используйте весь отмеренный материал только у одного пациента.
- Во избежание перекрёстной контаминации не используйте повторно одноразовые кисточки.

СОСТАВ

Этанол, силановое связующее вещество и др.

ХРАНЕНИЕ

Хранить при комнатной температуре (1-30 °C). Беречь от прямого солнечного света и любых источников воспламенения.