

- 4. Для предотвращения заражения пациента следует использовать защитные медицинские (стоматологические) перчатки и очки. При случайном контакте с мягкими тканями полости рта или слизистой немедленно промокнуть ватным тампоном, пропитанным спиртом, и прополоскать большим количеством воды. Медицинские (стоматологические) перчатки обеспечивают определенную защиту от прямого контакта с этим материалом, однако некоторые мономеры могут очень быстро проникать через перчатки на кожу. Это значит, что даже в случае попадания материала на защитные перчатки их следует немедленно снять и вымыть руки большим количеством воды.
- 5. При контакте с глазами необходимо немедленно промыть их большим количеством воды и обратиться за консультацией к врачу.
- 6. Этот продукт предназначен только для применения специалистами в стоматологии.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- A. Реставрация фронтальных и боковых зубов
- A-1. Очистка поверхности зуба
 - Тщательно очистить поверхность зуба от отложений.
- A-2. Выбор оттенка
 - С помощью шкалы оттенков выбрать необходимый оттенок, пока зуб еще влажный.
- A-3. Препарирование кариозной полости
 - Препарировать полость обычным способом.
- A-4. Изолированность
 - Изолировать с помощью резинового изолятора слюны.
- A-5. Защита пульпы
 - Когда пораженная зона расположена близко к пульпе, закрыть пульпу гидроокисью кальция и др.
 - Не использовать материалы, содержащие загелен, поскольку они влияют на качество полимеризации или адгезии материала.
- A-6. Обработка и нанесение адгезива
 - Нанести адгезив на поверхность дентина согласно инструкции производителя.
- A-7. Подготовка канюли
 - Установить поставляемую канюлю BEAUTIFIL (тонкую насадку) следующим образом:
 1. Снять защитный колпачок путем медленного вращения (Fig. A)
 2. Привинтить канюлю, вращая по часовой стрелке, пока она плотно не зафиксируется. (Fig. B)
 - Надеть чистые медицинские (стоматологические) перчатки, выполняя замену канюли.
- A-8. Нанесение
 - Нанести необходимое количество BEAUTIFIL Flow непосредственно в полость и придать необходимой форму. BEAUTIFIL Flow может быть также дозирован на блок для замешивания и нанесен в полость соответствующим инструментом.
 - Хранящийся в холодильнике материал перед применением нагреть до комнатной температуры.
 - Дозированную на блок для замешивания пасту защищать от окружающего света светозащитной пленкой, чтобы избежать случайной полимеризации материала.
 - Канюли должны использоваться только для одного пациента и утилизироваться после окончания процедуры во избежание перекрестной инфекции.
- A-9. Светополимеризация
 - Светополимеризация с помощью дентальной светополимеризационной лампы.
 - В случае глубокой полости рекомендуется нанесение материала дозами и светополимеризация слоя не более 2 мм.
 - В случае большой полости рекомендуется проводить светополимеризацию сегментами.
 - Дентальная светополимеризационная лампа и время светополимеризации

Дентальная светополимеризационная лампа	Галогеновый	Светодиодный
Время полимеризации	30 с	10 с

- Галогеновая светополимеризационная лампа
 - длина волны: 440–500 нм,
 - интенсивность света: $\geq 500 \text{ мВт/см}^2$
- Светодиодная светополимеризационная лампа
 - длина волны: 440–490 нм,
 - интенсивность света: $\geq 1000 \text{ мВт/см}^2$
- Использовать дентальную светополимеризационную лампу с указанными выше техническими характеристиками. При использовании моделей с другими параметрами мощности следует инструкции по эксплуатации конкретной лампы, чтобы выполнить надлежащую светополимеризацию BEAUTIFIL Flow.
- Персонал должен пользоваться защитными очками или защитным щитком, чтобы не смотреть непосредственно на свет светополимеризационной лампы. Персонал должен также защитить глаза пациента от прямого попадания полимеризационного света.
- Дезинфицировать шприц и защитный колпачок спиртом после каждого использования во избежание перекрестного заражения. Затем плотно закрыть колпачок. Следует быть осторожным, чтобы избежать попадания слюны в пасту.
- Дезинфицировать дентальную светополимеризационную лампу спиртом после каждого использования во избежание перекрестного заражения.

- A-10. Финирирование и полировка
 - После светополимеризации контурировать, финирировать и полировать реставрацию обычным способом.
- B. Прокладочный материал
- B-1. Следовать описанным выше шагам "A-1"-"A-7" по выполнению реставрации фронтальных и боковых зубов.
- B-2. Прокладочный материал
 - Нанести необходимое количество BEAUTIFIL Flow непосредственно в полость и придать необходимой форму. BEAUTIFIL Flow может быть также дозирован на блок для замешивания и нанесен в полость соответствующим инструментом. Светополимеризация материала с помощью дентальной светополимеризационной лампы (Галогеновая: 30 с, светодиодная: 10 с).
 - Хранящийся в холодильнике материал перед применением нагреть до комнатной температуры.
 - Дозированную на блок для замешивания пасту защищать от окружающего света светозащитной пленкой, чтобы избежать случайной полимеризации материала.

- Канюли должны использоваться только для одного пациента и утилизироваться после окончания процедуры во избежание перекрестной инфекции.
- B-3. Нанесение
 - Нанести композит.
- B-4. Финирирование и полировка
 - После светополимеризации контурировать, финирировать и полировать реставрацию обычным способом.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Следовать инструкциям по применению стоматологических материалов или инструментов, используемых с этим продуктом.
2. Применять продукт исключительно для целей, указанных в разделе ПОКАЗАНИЯ этой инструкции по применению.
3. Использовать данный продукт только до истечения указанного на упаковке и емкости срока годности. (Пример: TTTT-MM-DD → год-месяц-дата окончания срока годности)

ХРАНЕНИЕ

1. Хранить при комнатной температуре (1–30°C). Избегать воздействия высоких температур и высокой влажности. Защищать от прямых солнечных лучей, хранить вдали от источников возгорания.
2. Утилизировать использованную канюлю и хранить данный продукт любым из рекомендованных способов.
 - 2-1. Прикрепить новую. Вставить канюлю в узкое отверстие в головке защитного колпачка. (Fig. C)
 - 2-2. Надежно установить на место защитный колпачок. (Fig. D)

RU ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧЕсть ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ

Выделяющий фтор, текучий реставрационный материал

BEAUTIFIL Flow – это светостойкий, рентгеноконтрастный реставрационный материал. Выпускается с двумя различными степенями текучести: F02 и F10. F02 имеет меньшую степень текучести, F10 имеет большую степень текучести.

ОТТЕНКИ
 F02: A1, A2, A3, A3.5, A4, A30, G (цвет десны)
 F10: A1, A2, A3, A3.5, A4, A30, A3T (A3 полупрозрачный)

СОСТАВ
 Bis-GMA/бисфенол А-глицидил-метакрилат, TEGDMA/ триэтиленгликольдиметакрилат, наполнитель S-PRG на основе фторбораломинисиликатного стекла, инициатор полимеризации, пигменты и др.

ПОКАЗАНИЯ
 ➢ Реставрация фронтальных зубов
 ➢ Прокладочный материал
 ➢ Малые, неокклюзионные реставрации под давлением задних зубов

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не следует применять данный продукт для пациентов, у которых ранее наблюдались аллергические реакции на этот материал и/или метакрилатные мономеры.
2. Персонал, у которого ранее наблюдались аллергические реакции на этот материал и/или метакрилатные мономеры, не должен использовать этот продукт.
3. При возникновении у персонала или пациента воспалительных или других аллергических реакций следует немедленно прекратить применение данного продукта и обратиться за консультацией к врачу.