


Светоотверждаемые пасты для керамажа и солидекса

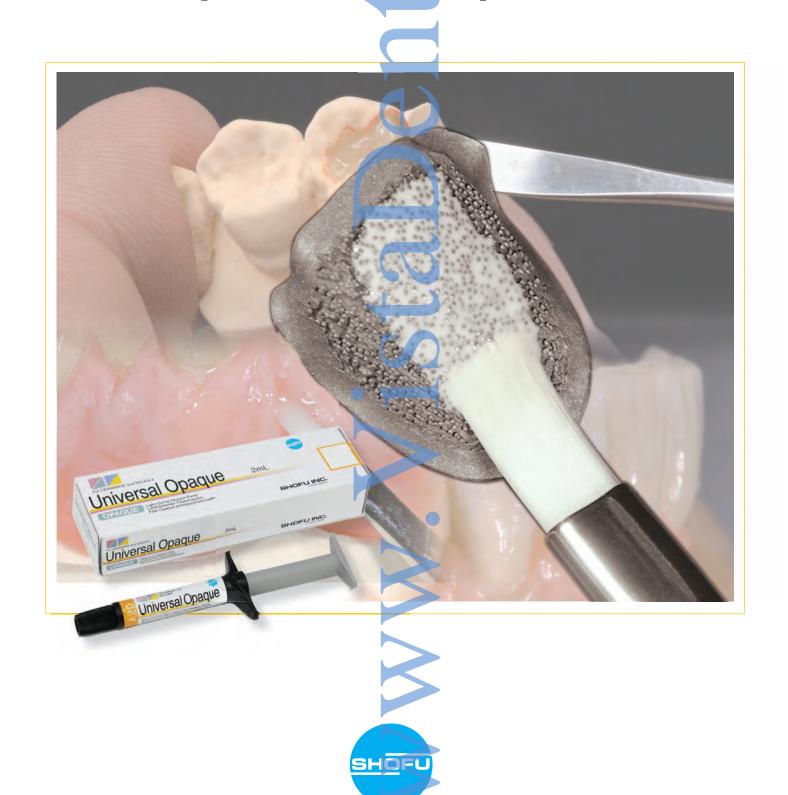

# Две композитные системы концепция одного опакера

• Универсальная система

Universal Opaque - это новое поколение непрозрачной пасты для систем CERAMAGE и SOLIDEX.

SOLIDEA.

### Легко и быстро наносится

Улучшенные тиксотропные свойства значительно повысили мягкость и текучесть паст. Теперь их чрезвычайно легко и быстро наносить.

Восстановление имплантатов и фотографии Uwe Gehringer & Clemens Bieber, Munich, Germany

# • Отличные маскирующие свойства и долговечность

Специально оптимизированные микронаполнители обеспечивают чрезвычайно тонкое распределение частиц, сочетая превосходные маскирующие свойства с одинаково выдающейся и долговечной связью с зубными сплавами.

### • Удивительно просто



# Pre-Opaque

Universal Pre-Opaque, первый нанесенный слой, течет во все области крепления каркаса и включается в систему склеивания. Особые полимеризационные характеристики этой пасты обеспечивают ее полное отверждение даже в подрезах.

# 1й Опаковый слой

Следующий маскирующий слой Universal Opaque может быть легко и равномерно нанесен благодаря их мягкой консистенции. Первый тонкий непрозрачный слой уже создает хороший маскирующий эффект и однородный базовый оттенок.

# 2й Опаковый слой


После нанесения второго слоя каркас равномерно маскируется в нужный оттенок.


# Правильный оттенок, с самого начала

# Whitening-Shades



# V-Shades

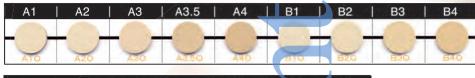

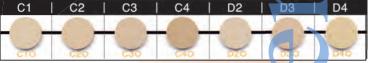

#### **NCC-Shades**

| rootA  | R2  | R3  | R3.5   |  |
|--------|-----|-----|--------|--|
|        |     | -   |        |  |
|        |     |     |        |  |
| rootAO | R20 | R30 | F-3.50 |  |

#### Effect-Shades

| МО | BGO | GO | GUM-O | InO | VpO | VrO | РО |
|----|-----|----|-------|-----|-----|-----|----|
|    |     |    | -     |     |     |     |    |
| MO | BGO | GO | GUM-O | InO | VpO | ViO | PO |


# Надежная связь с любым стоматологическим сплавом

Universal Opaque образует симбиотическую сеть со связующим агентом М.L. Primer, обеспечивающим прочную и надежную связь.


Особенно при использовании драгоценных сплавов эта сеть чрезвычайно устойчива к гидролизу и термическим нагрузкам.

Источник: кафедра зубного протезирования

Прочность на сжатие при сдвиговом сцеплении с полудрагоценным сплавом (AuroLloyd KF) после 24 ч хранения в дистиллированной воде при 37°

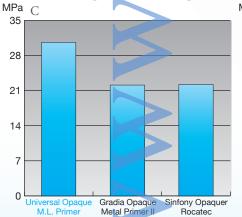

Прочность на сжатие при сдвиге к полудрагоценному сплаву (AuroLloyd KF) после 25 000 термоциклов

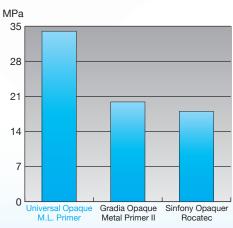

# Системные компоненты



#### Universal Pre-Opaque

Universal Pre-Opaque очень текуч и надежно сцепляется со стоматологическими сплавами и пастами Universal Opaque.



#### **SOLIDEX 8-Color-Set**

Стартовый набор SOLIDEX, включающий цвета Vita от A1 до A4, B2, B3 и C3



#### M.L. Primer

Для надежного приклеивания ко всем стоматологическим сплавам



#### Universal Opaque

Универсальные опаковые пасты легко наносятся и одинаково подходят для систем CERAMAGE и SOLIDEX.



#### **CERAMAGE 8-Color-Set**

Все компоненты для изготовления эстетических реставраций V-оттенков от A1 до A4, B2 и B3, а также C3 в практичной стойке



#### CRB - Ceraresin Bond

Проверенная система для соединения со светоотверждаемыми и всамоотверждающимися смолами и всеми керамическими облицовочными материалами