

VINTAGE Halo

полевошпатная керамика с гало-эффектом


Высокотемпературная керамическая система с естественным рассеиванием и отражением света (гало-эффект) была разработана в сотрудничестве с Makoto Yamamoto. Используя только порошки «опактивный дентин», «дентин» и «опалесцирующий режцовый край», можно создать реставрацию, которая выглядит, как естественный зуб, и при этом не требуется использовать порошки для придания какого-либо особого эффекта. Обладающий температурой обжига дентина в 910 °C Vintage Halo идеально сочетается со всеми стандартными и биосовместимыми сплавами.



С помощью опалесцирующего порошка для режущего края можно выполнить последовательную технику наслаивания, используя керамику цвета дентина и эмали. Так зуб будет выглядеть естественно.

Показания

Сочетается со всеми стандартными сплавами, коэффициенты теплового расширения которых составляют $13,4-14,5 \times 10^{-6} \text{K}^{-1}$ (25 °C – 500 °C).

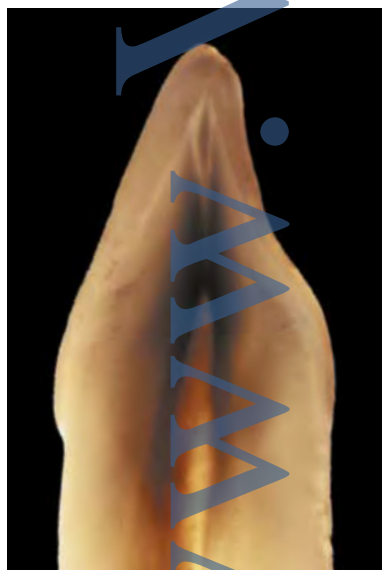

Естественные зубы обладают двойной структурой, т.е. состоят из дентина и эмали. От дентина зависит оттенок зуба и его насыщенность. А его внешний вид – результат взаимодействия света и цветов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Естественная флуоресценция и опалесценция, в т.ч. после нескольких циклов обжига

Сочетается со всеми сплавами, которые на 30 и менее процентов состоят из серебра.

Экономная послойная система благодаря модифицированной двухслойной технике («Масса» / «опаловый режущий край»)

Отдельные цветовые индикаторы для всех компонентов

Высокая стабильность при наслоении

Низкая усадка во время обжига

VINTAGE Halo - наборы



Base Set

Base Set

Ознакомление с 19 базовыми оттенками

- Опаковый дентин, 19 шт. по 15 г / 50 г - Масса, 19 шт. по 15 г / 50 г
- Опаловая эмаль, 6 шт. по 15 г / 50 г - Эмаль, 6 шт. по 15 г / 50 г
- Коррекция (Add-On T / Add-On B), 2 шт. по 15 г
- цветовой индикатор № 1, № 2, № 3 – по 1 • инструкция по применению

Opaque Powder Set

Опаковый порошок с 19 базовыми оттенками

- Опаковый порошок, 19 шт. по 15 г - Vintage Halo Opaque Liquid, 50 мл
- инструкция по применению

Opal Porcelain Set

Оттенки «опалесцирующий режущий край» и «эффект» обеспечивают оптимальную рефракцию в области режущего края

- 10 оттенков, по 15 г / 50 г - цветовой индикатор № 2
- инструкция по применению



Whitening Set

Effect Color Set

Натуральные эффекты для опакового дентина, дентина и области режущего края

- 10 оттенков, по 15 г - цветовой индикатор № 6
- инструкция по применению

Margin Porcelain Powder Set

Для эстетичного перехода края

- 19 оттенков, по 15 г - Коррекция CPM, 15 г
- Коррекция CPM Fine, 15 г - Isolation Liquid (изолирующая жидкость), 10 мл
- Vintage CPM Modelling Liquid, 3 мл - цветовой индикатор № 7
- инструкция по применению

Номер	Кол-во	Изделие
7000	1 шт.	Vintage Halo Base Set, по 15 г
7001	1 шт.	Vintage Halo Base Set, по 50 г
7100	1 шт.	Vintage Halo Opaque Powder Set
7360	1 шт.	Vintage Halo Effect Color Set
7500	1 шт.	Vintage Halo Opal Porcelain Set, по 15 г
7501	1 шт.	Vintage Halo Opal Porcelain Set, по 50 г
7650	1 шт.	Vintage Halo Margin Porcelain Powder Set
7770	1 шт.	Vintage Halo Whitening Set
7800	1 шт.	Vintage Halo Value Plus Porcelain Set

Whitening Set

Дополнительные оттенки W1, W2 и W3 для придания большей яркости реставрациям (отбеленные оттенки)

- Опаковый, 3 шт. по 15 г - Масса, 3 шт. по 15 г
- Опаловая эмаль (Opal 56), 15 г
- шкала оттенков - инструкция по применению

VINTAGE Halo - отдельные компоненты

Оттенок	Номер 15 г	Номер 50 г
ОПАКОВЫЙ ПОРОШОК		
A10	7101	7121
A20	7102	7122
A30	7103	7123
A3,50	7104	7124
A40	7105	7125
RootA0	7106	7126
B10	7107	7127
B20	7108	7128
B30	7109	7129
B40	7110	7130
RootB0	7111	7131
C10	7112	7132
C20	7113	7133
C30	7114	7134
C40	7115	7135
RootC0	7116	7136
D20	7117	7137
D30	7118	7138
D40	7119	7139
ОПАКОВЫЙ ПОРОШОК WHITENING		
W10	7771	7776
W20	7772	7777
W30	7773	7778
ОПАКОВЫЙ ПОРОШОК RED SHIFT		
R10	7411	7431
R20	7412	7432
R30	7413	7433
R3,50	7414	7434
R40	7415	7435
ОПАКОВЫЙ ПОРОШОК ЭФФЕКТ		
OM-G	7371	7391
OM-P	7372	7392
OM-O	7373	7393
OM-Br	7374	7394
OM-Y	7375	7395
OM-W	7376	7396
OM-S	7377	7397

Оттенок	Номер 15 г	Номер 50 г	Номер 200 г
МАССА			
A1B	7201	7221	7241
A2B	7202	7222	7242
A3B	7203	7223	7243
A3,5B	7204	7224	7244
A4B	7205	7225	7245
RootAB	7206	7226	7246
B1B	7207	7227	7247
B2B	7208	7228	7248
B3B	7209	7229	7249
B4B	7210	7230	7250
RootBB	7211	7231	7251
C1B	7212	7232	7252
C2B	7213	7233	7253
C3B	7214	7234	7254
C4B	7215	7235	7255
RootCB	7216	7236	7256
D2B	7217	7237	7257
D3B	7218	7238	7258
D4B	7219	7239	7259
ОПАКОВЫЙ ДЕНТИН			
OD-A1	7711	7731	
OD-A2	7712	7732	
OD-A3	7713	7733	
OD-A3,5	7714	7734	
OD-A4	7715	7735	
OD-RootA	7716	7736	
OD-B1	7717	7737	
OD-B2	7718	7738	
OD-B3	7719	7739	
OD-B4	7720	7740	
OD-RootB	7721	7741	
OD-C1	7722	7742	
OD-C2	7723	7743	
OD-C3	7724	7744	
OD-C4	7725	7745	
OD-RootC	7726	7746	
OD-D2	7727	7747	
OD-D3	7728	7748	
OD-D4	7729	7749	

Оттенок	Номер 15 г
ПЛЕЧО	
A1M	7651
A2M	7652
A3M	7653
A3,5M	7654
A4M	7655
RootAM	7656
B1M	7657
B2M	7658
B3M	7659
B4M	7660
RootBM	7661
C1M	7662
C2M	7663
C3M	7664
C4M	7665
RootCM	7666
D2M	7667
D3M	7668
D4M	7669
CPM	7670
CPM Fine	7671

Оттенок	Номер 15 г	Номер 50 г	Номер 200 г
ЦВЕТОВОЙ ЭФФЕКТ			
White	7361	7381	
Orange	7362	7382	
Brown	7363	7383	
Red-Dark	7364	7384	
Red-Light	7365	7385	
MP	7366	7386	
MY	7367	7387	
BG	7368	7388	
BT	7369	7389	
YT	7370	7390	
ЦВЕТОВОЙ ЭФФЕКТ - VALUE PLUS			
VOP (Opaque)	7820	7840	
VDL (Diluent)	7821	7841	
ОПАЛОВАЯ ЭМАЛЬ			
Opal 56	7510	7541	
Opal 57	7511	7521	7531
Opal 58	7512	7522	7532
Opal 59	7513	7523	7533
Opal 60	7514	7524	7534
ЭФФЕКТ ОПАЛА			
Opal T	7515	7525	7535
Opal SL	7516	7526	7536
Opal Amber	7517	7527	7537
Opal Occlusal	7518	7528	7538
Opal White-E	7519	7529	7539
Opal Milky	7520	7530	7540
СТАНДАРТНАЯ ЭМАЛЬ			
57	7331	7341	7351
58	7332	7342	7352
59	7333	7343	7353
60	7334	7344	7354
T	7335	7345	7355
T-Glass	7336	7346	7356

Оттенок	Номер 15 г	Номер 50 г
WHITENING МАССА		
W1B	7781	7786
W2B	7782	7787
W3B	7783	7788
RED SHIFT МАССА		
R1B	7417	7437
R2B	7418	7438
R3B	7419	7439
R3,5B	7420	7440
R4B	7421	7441
VR1B	7423	7443
VR2B	7424	7444
VR3B	7425	7445
VR3,5B	7426	7446
VR4B	7427	7447
VALUE PLUS МАССА		
VA1B	7811	7831
VA2B	7812	7832
VA3B	7813	7833
VA3,5B	7814	7834
VA4B	7815	7835
VB1B	7816	7836
VB2B	7817	7837
VB3B	7818	7838
VB4B	7819	7839
КОРРЕКЦИЯ		
Add-On T	7020	
Add-On B	7021	

VINTAGE Halo - жидкости

Номер	Кол-во	Изделие
7010	50 мл	Vintage Halo Opaque Liquid
7011	500 мл	Vintage Halo Opaque Liquid
7012	50 мл	Vintage Halo Opaque Liquid L
7642	3 мл	Vintage CPM Modelling Liquid
8012	7 мл	Vintage Margin Porcelain Isolation Liquid (фломастер)
9611	50 мл	Vintage Mixing Liquid
9612	500 мл	Vintage Mixing Liquid
9613	50 мл	Vintage Mixing Liquid HC
9614	500 мл	Vintage Mixing Liquid HC
9615	50 мл	Vintage Hardening Liquid