

Сильный дуэт для надежного соединения



CRB - Cera ResinBond

Система Cera Resin Bond позволяет соединять самые разные материалы друг с другом внутри ротовой полости и вне её, надёжно и на долгий срок.

Например, Вы можете быстро и рационально дополнять керамические реставрации светоотверждаемыми материалами. Кроме этого, CERA Resin Bond надёжно соединяет полимеры холодной полимеризации со светоотверждаемыми облицовочными пластмассами, а также различные светоотверждаемые облицовочные пластмассы друг с другом.

Можно также без каких-либо ограничений использовать светоотверждаемые облицовочные материалы для придания индивидуальных особенностей зубам протезов.

Такие соединения чрезвычайно устойчивы к воздействию влаги и тепловым нагрузкам.




Исследования - наш лучший
продукт

Устойчивые соединения без компромиссов

Cera Resin Bond убеждает великолепным и долговечным соединением светоотверждаемых и самоотверждаемых пластмасс с любыми керамическими облицовочными материалами.


Именно благодаря простому применению в ротовой полости и вне её CERA Resin Bond предлагает практически неограниченные возможности использования в стоматологической клинике и зуботехнической лаборатории.

Даже спустя длительное время ношения кондиционированной реставрации Cera Resin Bond обеспечивает стабильное соединение без компромиссов.

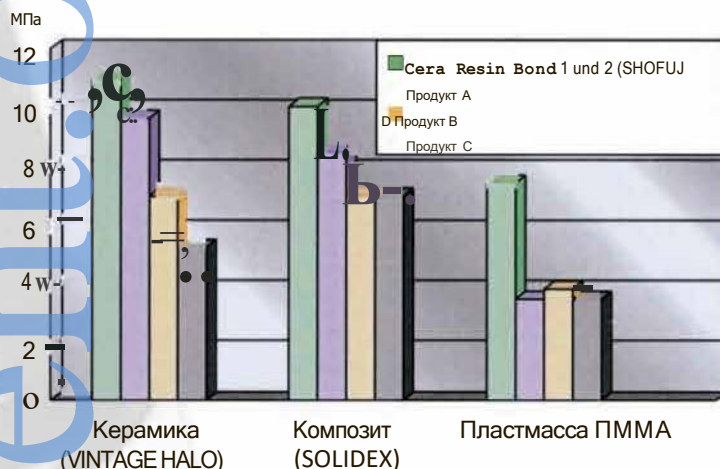


Прочность соединения между композитом и различными материалами с использованием Cera Resin Bond, а также систем для соединения пластмассы/керамики других производителей


Простое и быстрое применение

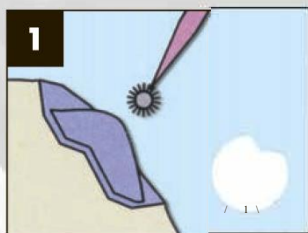

Нанести **Bond 1** / оставить на **10 сек.**

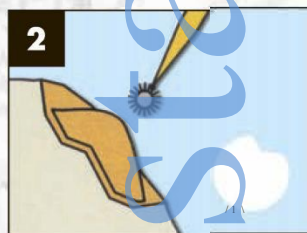

Нанести **Bond 1** / оставить на **10 сек.**

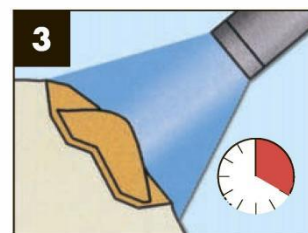

Полимеризовать **20 сек.** с помощью полимеризационной лампы / Готово к нанесению композита

Многообразие возможностей:

- Возможность применения в ротовой полости и вне ротовой полости
- Ремонт и дополнение формы керамических коронок и мостов с использованием облицовочных композитов
- Дополнение формы керамических и пластмассовых зубов композитами
- Надёжное соединение самоотверждаемых пластмасс со светоотверждаемыми облицовочными композитами
- Повышение прочности соединения акриловых зубов с самоотверждающимися пластмассами для протезов
- Возможность комбинации с адгезивным раствором ML Primer



CRB Kit
номер для заказа:
1741